

SK UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Podľa normy EN 149:2001+A1:2009, jednorazové filtrujúce polomasky, chrániace pred pevnými a kvapalnými časticami, sú klasifikované v jednej z troch kategórií: FFP1, FFP2 a FFP3. Pred prečítaním nasledujúcich informácií zistíte, do ktorej kategórie patrí polomaska, ktorú chcete používať. Kategória je uvedená na balení ako aj priamo na polomaske.

POUŽITIE:

- FFP1: ochrana pred netoxickými časticami v pevnom alebo kvapalnom skupenstve (napr. olejové hmly) v koncentráciách do 4×OEL (APF=4. NPF=4).
- FFP2: ochrana pred netoxickými, alebo stredne toxickými časticami v pevnom alebo kvapalnom skupenstve (napr. olejové hmly) v koncentráciách do 10×OEL (APF=10. NPF=12).
- FFP3: ochrana pred netoxickými, stredne toxickými alebo vysoko toxickými časticami v pevnom alebo kvapalnom skupenstve (napr. olejové hmly) v koncentráciách do 30×OEL (APF=30. NPF=50).

*POZOR: OEL = expozičný limit na pracovisku (Occupational Exposure Limit). APF = koeficient zaručenej ochrany (Assigned Protection Factor). NPF = Koeficient nominálnej ochrany (Nominal Protection Factor).

PRED POUŽITÍM: skontrolujte masku vrátane všetkých prvkov, ktoré sú jej súčasťou, či nie sú prederavené, roztrhnuté, alebo akýmkoľvek spôsobom poškodené alebo zničené. Ak objavíte akékoľvek poškodenie – NEPOUŽÍVAJTE! Použite novú.

A: POUŽITIE:

- 1 Masku položte na dlaň pričom nosovú časť masky držte prstami. Upevňujúce pásiky majú slobodne visieť pod dlaňou.
 - 2 Masku priložte k tvári tak, aby sa nosová časť masky nachádzala na chrbte nosa.
 - 3 Natiahnite gumičky určené na uchytenie polomasky a upevnite ich za ušami (FFP1, FFP2). / Natiahnite dolný upevňujúci pásik za hlavu a umiestnite ho pod ušami. Natiahnite horný upevňujúci pásik za hlavu a umiestnite ho nad ušami (FFP1, FFP2, FFP3).
 - 4 Vytvarujte mäkkú nosovú časť tak, aby dôkladne kopírovala tvar nosa.
 - 5 Skontrolujte tesnosť polomasky: polomasku objímte dlaňami a silno vydýchnite (polomaska bez výdychového ventilu) alebo sa silno nadýchnite (polomaska s výdychovým ventilom). Vo vnútri masky má vzniknúť tlak. Ak sa okolo nosa dostáva vzduch do vnútra, lepšie dopasujte nosovú časť. Ak sa vzduch dostane cez hrany masky, lepšie dopasujte polohu masky a upevňujúce pásiky.
- *POZOR: Ak sa vám dýcha ťažko, znamená to, že sa maska poškodila, alebo sa nedá správne dopasovať, preto masku okamžite vymeňte na inú. Dôkladné dodržiavanie vyššie uvedených pokynov je veľmi dôležité pre bezpečné používanie masiek.


VAROVANIA:

1. Nedodržiavanie všetkých pokynov a obmedzení týkajúcich sa tohto výrobku môže znížiť úroveň filtrovania a viesť k poškodeniu zdravia alebo k strate života.
2. Dobrá vybraná filtrujúca polomaska predstavuje dôležitý prvok ochrany zdravia. Pred použitím masky sa poraďte s odborníkom na BOZP.
3. Výrobok nie je zdrojom kyslíka. Používať iba v dobre vetraných miestnostiach so vzduchom s dostatočným množstvom kyslíka na dýchanie. Tento typ masiek sa nesmie používať, ak koncentrácia kyslíka vo vzduchu je nižšia ako 19%.
4. Nepoužívajte, ak je koncentrácia nebezpečných látok nebezpečná pre zdravie alebo život.
5. Nepoužívajte, ak sa vo vzduchu nachádzajú výbušné zmesi.
6. Opustite pracovisko a vyjdite na čerstvý vzduch ak (a) sa vám začne ťažko dýchať, alebo (b) začne sa vám krútiť hlava alebo sa objavia iné nebezpečné príznaky.
7. Brada alebo iné špecifické vlastnosti tvaru tváre môžu znížiť efektívnosť masky.
8. Masky sa v žiadnom prípade nesmú nejakým spôsobom upravovať alebo prerábať.
9. Na jednorazové použitie. Použite iba jeden raz. Nevýžaduje technickú obsluhu. Použitú masku vyhodte.
10. Masky určené na používanie skladujte v nádobe tak, aby boli masky chránené pred pôsobením priameho slnečného žiarenia.
11. Polomasky série XC, s uhlíkovými vrstvami, znižujú zaťažujúce pachy. NECHRÁŤTE pred plynmi s koncentráciou nad 1 OEL. V tomto prípade použite plynovú masku.

SKLADOVANIE: Masky by sa mali skladovať pri teplote -20 ° C až + 40 ° C a vlhkosti pod 70%. **PRODUCENT/ EU ZASTUPENIE/DOVOZCA:** podrobnosti certifikát.

B VÝZNAM PIKTOGRAMOV / SYMBOLOV:

- a) Overtvorte v užívateľskej príručke.
- b) Rozsah teplôt skladovania.
- c) Maximálna úroveň relatívnej vlhkosti pri skladovaní.
- d) Lehota použiteľnosti: uvedený na výrobku.
- e) NR: táto maska sa môže používať maximálne jednu zmenu (maximálne 8 hodín). Jednorazový výrobok, nesmie sa používať viackrát.
- f) D: ak je uvedené, tak táto maska úspešne prešla nepovinnými skúškami upchávania dolomitovým prachom pre slobodnejšie a komfortnejšie dýchanie. EXP doba expirácie výrobku pri správnom skladovaní.

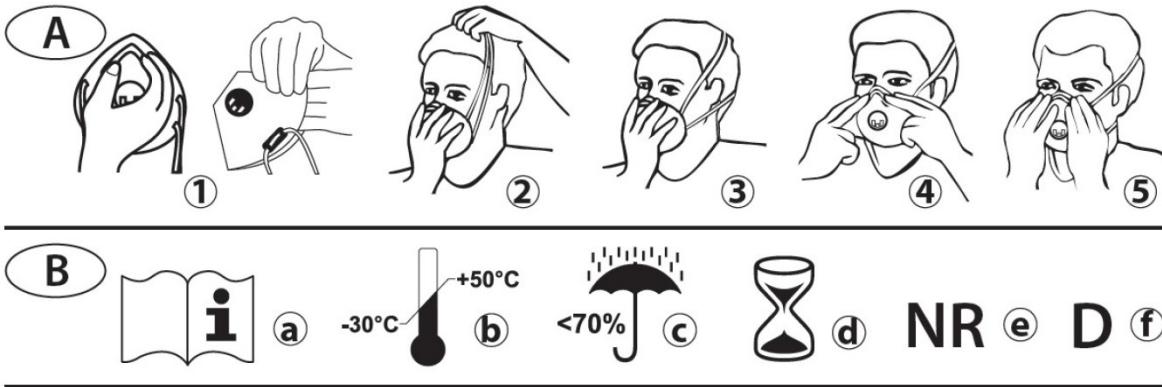

Manufactured according to PPE Regulation (EU) 2016/425, EN 149:2001+A1:2009

Návod v elektronickej podobe: <http://www.stomia.sk/-na-stiahnutie>

DEXXON MEDICAL FFP2 NR, MODEL: TRNMT-NRFM002 (Respirátor FFP2 NR, MODEL: TRNMT-NRFM002, farebný)

DOVOZCA: DEXXON ENERJI SAN. VE TIC. A.S., Istanbul Vizyon Park Ofis Bloklari, Yenibosna Merkez Mah. 29 ekim Cad., No:3, Plaza:1, Kat:8, No:84, Bahcelievler, Istanbul, Turkey

DISTRIBÚTOR: STOMIA s.r.o., Staničné námestie 1, 040 01 Košice, www.stomia.sk