

MEDICAL+ 99,5% je certifikovaný inhalačný kyslík v spreji s inhalačnou maskou a kanylou / inhalačným adaptérom.

Inhalačný kyslík je ideálny pre ľudí s dýchacími problémami, astmou, dýchavičnosťou a je odporúčaný pre športovcov, vodičov, študentov, aktívnych ľudí, tiež ľudí trpiacich nespavosťou a úspešne sa používa aj v kozmetike na zlepšenie pokožky.

- jednoduché použitie
- vybavený pohodlným ventilom, maskou a hadičkou
- koncentrácia kyslíka: až 99,5%
- bez pridanej esencie
- 14 L stlačeného kyslíka v spreji
- vyrobené v EÚ
- vyhlásenie o zhode – CE



Inhalačný kyslík sa odporúča:

Športovcom - kyslík je zdrojom energie pre svaly a mozog . Urýchľuje obnovu ATP, hlavného nosiča energie v bunkách, čo umožňuje rýchlejší návrat k ďalšej sérii cvičení

Chronicky chorým pacientom - kyslík podporuje imunitný systém, tvorbou hormónov a bielkovín. Odporúča sa pri dýchavičnosti a astme.

Obéznym ľuďom - kyslík je najdôležitejším faktorom v metabolickom procese pri konzumácii tučných jedál a jedál s vysokým obsahom sacharidov, ako aj cukrov a alkoholu. Naše telo musí na odbúravanie týchto látok použiť viac kyslíka ako napríklad bielkoviny.

Vodičom - obnovuje bdelosť a rýchlosť reakcie, znižuje ospalosť počas dlhých monotónnych trás

Študentom - zlepšuje pamäť a koncentráciu na krátke časové obdobie, ale niekedy veľmi dôležitú chvíľu, napríklad počas skúšok

Vlastnosti kyslíka

- spomaľuje starnutie ľudských buniek
- pomáha pri bolestiach hlavy
- pomáha pri únave
- posilňuje imunitu
- zlepšuje dýchanie u pacientov trpiacich astmou či alergiami
- zlepšuje psychický stav osôb trpiacich depresiami
- zvyšuje fyzickú kondíciu až o 25 %

Obsah: 14 litrov kyslíka

Hmotnosť fľaše brutto bez masky / adaptéra: 152g, +/- 2% (hmotnosť obsahu 25g +/- 1%)

Spôsob použitia:

- **Odstráňte ochrannú krytku z ventila**
- **Nasad'ite trysku s kanylou / trysku s inhalačným adaptérom na kyslíkovú fľašu**
- **Nasad'ite si inhalačnú masku / inhalačný adaptér na nos a ústa podľa návodu nižšie**
- **Odstráňte ochrannú krytku z ventila**
- **Zatlačte ventil na fľaši na 2 sekundy a začnite inhalovať kyslík hlbokým nádychom. Inhaláciu zopakujte najviac 2 vstrekmí po sebe.**
- **Ďalšiu inhaláciu zopakujte najskôr po 10 min.**



Distribútor:

STOMIA s.r.o.,

Staničné námestie 1, 040 01 Košice

stomia@stomia.sk

+421 55 62 522 88

+421 55 62 300 67

+421 907 794 861

Upozornenie

Môže spôsobiť alebo zintenzívniť požiar; fľaša je pod tlakom, neodbornou manipuláciou hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Skladujte mimo dosahu detí. Skladujte mimo otvoreného ohňa, iskier. Nepoužívať v blízkosti zdroja tepla, ohňa. Nevystavujte teplote presahujúcej 50°C. V blízkosti fľaše je zakázané fajčiť. Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Skladujte na dobre vetranom mieste.